


ZUBEREITUNGSKARTE FLOSEAL 5 ML

Das Original: die Gelatine-Thrombinmatrix von Baxter

A) THROMBIN ZUBEREITEN



Durchstechflaschen-Adapter
(mit geöffneter, festgehaltener Verpackung) auf NaCl-Ampulle drehen.

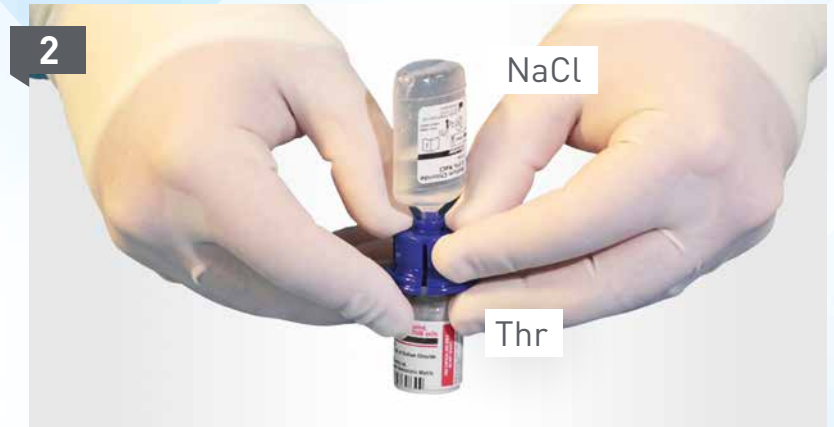

I. Adapter in Thrombin-Fläschchen stechen und NaCl überführen.
II. Thrombin unter leichtem Schwenken auflösen.

B) THROMBIN MIT GRANULA MISCHEN




I. Leere Spritze auf Adapter schrauben.
II. 4 ml Thrombin aufziehen.



I. Spritzen verschrauben.
II. Durch mind. 10 x hin- und herdrücken mischen.


IN 3 SCHRITTEN ZUR SCHNELLEN HÄMOSTASE

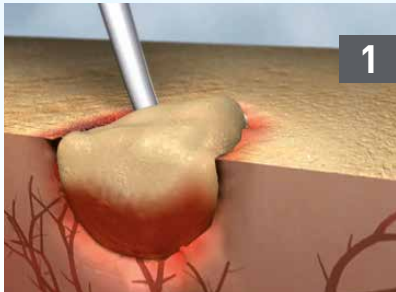

1


FLOSEAL beginnend an der **tiefsten Stelle der Läsion** zügig auftragen und dabei den Applikator langsam zurückziehen.

FLOSEAL passt sich aufgrund seiner Konsistenz auch unregelmäßigen Wundoberflächen und schwer zugänglichen Bereichen an.

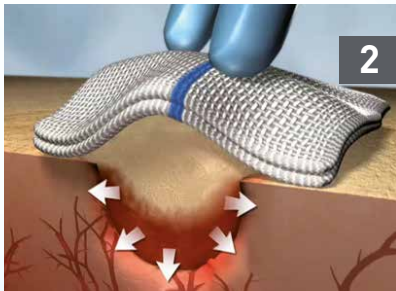

2

FLOSEAL **2 Minuten lang mit einer feuchten Kompresse** vor Ort halten, damit FLOSEAL seine volle Wirkung entfalten kann.

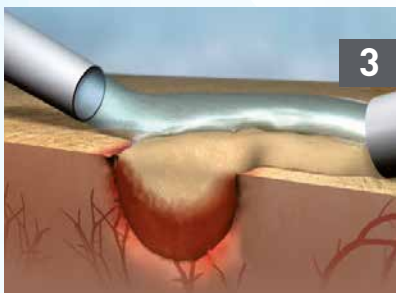

3

Wenn die Blutung gestillt ist, **spülen Sie überschüssiges FLOSEAL vorsichtig ab**. So erhalten Sie sofort wieder freie Sicht auf den Situs.

Referenzen

1. FLOSEAL Hemostatic Matrix Gebrauchsanweisung, Stand: Oktober 2020, Baxter Healthcare SA



Floseal Hemostatic Matrix
Needle-Free 5 ml (1 oder 6 Stück)
Art.-Nr. 1503353



Floseal Hemostatic Matrix
Needle-Free 10 ml (1 oder 6 Stück)
Art.-Nr. 1503354

OFFEN [mit 3 beige packten Applikatoren]



2 starre Applikatoren in unterschiedlicher Länge



1 formbarer Applikator

BESTELLBARE APPLIKATOREN

OFFEN



ADS201894
Gebogener Applikator zum Einmalgebrauch

LAPAROSKOPISCH



0600125
Laparoskopischer Applikator, 41 cm, für Einmalgebrauch (Kunststoff, 5 mm, mit Stempel)



ADS201865
EasyGrip FLO-41, laparoskopischer Applikator, 41 cm, zum einhändigen Einmalgebrauch

Advancing the art of healing

Baxter und Floseal sind Marken von Baxter International Inc.

BIOB0029FLO0522 / DCH-AS19-220015

advancedsurgery.baxter.de/de/floseal



Deutschland

Baxter Deutschland GmbH
Edisonstraße 4
85716 Unterschleißheim
Tel +49 89 31701 0
info_de@baxter.com
www.baxter.de

Österreich

Baxter Healthcare GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15
1020 Wien
+43 1 71120 0
info_austria@baxter.com
www.baxter.at

Schweiz

Baxter AG
Thurgauerstrasse 130
8152 Glattpark (Opfikon)
Tel +41 (0) 44 908 50 50
info_ch@baxter.com
www.baxter.ch