


# EASYGRIP FLO-41

## MIC-APPLIKATOR

## Kurzanleitung

### 1 Vorbereitung und Handhabung des Applikators

Innerhalb des Sterilbereichs

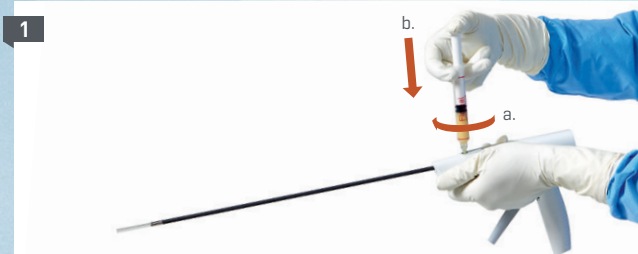

- **a)** Befestigen Sie die FLOSEAL Spritze an der EASYGRIP FLO-41-Füllöffnung. **b)** Befüllen Sie den Behälter des Applikators vollständig mit FLOSEAL. **Die Spritze kann anschließend vom Applikator entfernt werden.**



- Bereiten Sie den Applikator vor, indem Sie wiederholt den Auslöser betätigen (ca. 2 bis 3 mal), bis FLOSEAL in der transparenten flexiblen Spitze sichtbar wird. Der EASYGRIP FLO-41-Applikator ist jetzt einsatzbereit.




- Betätigen Sie den Auslöser des EASYGRIP FLO-41, um FLOSEAL entsprechend der Anweisung zu applizieren. Möglicherweise muss der Auslöser mehrmals betätigt werden, um die gewünschte Menge von FLOSEAL zu applizieren.

Wenn während desselben operativen Eingriffs mehr FLOSEAL benötigt wird, wiederholen Sie die Schritte 1 und 3. Für eine wiederholte Befüllung ist keine Erstvorbereitung des Applikators erforderlich.

### 2 Applikation von verbleibendem Restproduktvolumen


Innerhalb des Sterilbereichs

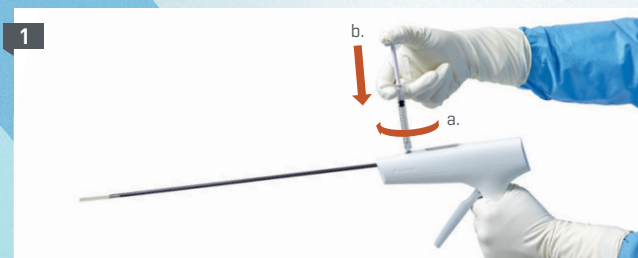

- Wenn verbleibendes FLOSEAL appliziert werden soll, **füllen Sie die mitgelieferte 1,5-ml-Spritze mit nichtheparinisierter Kochsalzlösung.** **a)** Befestigen Sie die Spritze mit der Kochsalzlösung an der EASYGRIP FLO-41 Füllöffnung. **b)** **Füllen Sie den Behälter ausschließlich mit 1,5 ml nicht-heparinisierter Kochsalzlösung.**



- Betätigen Sie den Auslöser des EASYGRIP FLO-41-Applikators, um die verbleibende FLOSEAL Matrix an der Blutungsquelle zu applizieren.

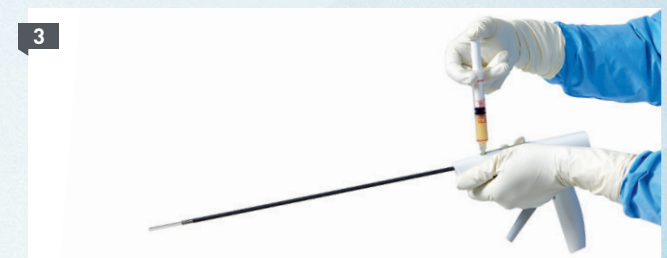

- Wenn nach dem Applizieren des verbleibenden Restproduktvolumens eine erneute Anwendung von FLOSEAL benötigt wird, muss die Kochsalzlösung aus der Kanüle entfernt werden. **Entfernen Sie die Kochsalzlösung aus der Kanüle und bereiten Sie den Applikator für einen weiteren Einsatz vor.**

## EASYGRIP FLO-41 – Anwendungsgebiete

Das EASYGRIP FLO-41 System dient zur Applikation der hämostatischen Matrix FLOSEAL an Blutungsstellen durch einen Trokar von 5 mm oder größer.

### Warnhinweise

- Nur zum einmaligen Gebrauch. Nicht mehrfach verwenden. Nicht resterilisieren. Die Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung eines Einmalprodukts kann zu Kontaminierung und einer Beeinträchtigung der Funktion oder strukturellen Integrität des Produkts führen.
  - Verwenden Sie das EASYGRIP FLO-41 System nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder offen ist oder wenn der Applikator beschädigt ist, da dies zu einer Beeinträchtigung der Gerätefunktion führen kann.
  - Verwenden Sie keine Luft als Treibmittel, um Hämostasemittel aus dem EASYGRIP FLO-41 System auszudrücken
  - Verwenden Sie das EASYGRIP FLO-41 System nicht zum Manipulieren oder Einziehen von Organen oder Gewebe.
  - Biegen Sie die formbare Spitze nicht, indem Sie sie gegen Organe oder Gewebe drücken.
- Ausführliche Produktinformationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

### BESTELLINFORMATIONEN

EASYGRIP FLO-41	6 Stück	ADS201865
FLOSEAL Hemostatic Matrix Needle-Free 5 ml	1 oder 6 Stück	1503353
FLOSEAL Hemostatic Matrix Needle-Free 10 ml	1 oder 6 Stück	1503354

## Advancing the art of healing

Baxter, Advancing the art of healing und Floseal sind Marken von Baxter International Inc.  
Thrombin-JMI ist eine eingetragene Marke von Kind Pharmaceuticals Research and Development, LLC.  
BIOB0027FL00122 / DCH-AS19-220002

**Deutschland**  
Baxter Deutschland GmbH  
Edisonstraße 4  
85716 Unterschleißheim  
Tel +49 89 31701 0  
info\_de@baxter.com  
www.baxter.de

**Österreich**  
Baxter Healthcare GmbH  
Stella-Klein-Löw-Weg 15  
1020 Wien  
+43 1 71120 0  
info\_austria@baxter.com  
www.baxter.at

**Schweiz**  
Baxter AG  
Thurgauerstrasse 130  
8152 Glattpark (Opfikon)  
Tel +41 (0) 44 908 50 50  
info\_ch@baxter.com  
www.baxter.ch

**Baxter**